

Kurzanleitung (iOS)

Wie verbinde ich die App SaniQ mit dem Bluetooth®-fähigen Messgerät aponorm® Basis Plus Bluetooth®?

- 1 Schalten Sie das Blutdruckmessgerät ein. Öffnen Sie die App SaniQ auf Ihrem iPhone und tippen Sie unten rechts auf  Mehr.
- 2 Klicken Sie auf **Messgeräte** und wählen Sie das Messgerät aponorm® Basis Plus Bluetooth® aus. Tippen Sie auf **Verbinden**.
- 3 Drücken Sie an Ihrem Messgerät rechts unterhalb des Bildschirms auf die **+**-Taste. Achten Sie dabei darauf, dass die Tastensperre (an der rechten Seite des Geräts) auf dem geöffneten Schloss  steht.
- 4 Ihr iPhone zeigt nun das gefundene Messgerät an. Wählen Sie es aus. Im Anschluss wird das Gerät via Bluetooth® mit Ihrem iPhone verbunden.
- 5 Nun kann die Messung Ihrer Herzwerte starten: Tippen Sie unten links auf  Tagebuch. Wählen Sie das Tagebuch **Blutdruck** aus.
- 6 Legen Sie die Oberarmmanschette des Blutdruckmessgerätes an. Bitte entnehmen Sie den Herstellerangaben, wo und wie die Manschette korrekt angelegt wird. Klicken Sie dann in der App SaniQ oben rechts auf **Hinzufügen**.
- 7 Tippen Sie auf **Messung vorbereiten** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 8 Sobald die Messung abgeschlossen ist, klicken Sie in SaniQ oben rechts auf **Speichern**. Ihre gemessenen Werte werden automatisch Ihrem Blutdruck-Tagebuch hinzugefügt.

